

Gebrauchsanweisung Arthritis Rollator



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Arthritisrollators keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Arthritisrollators. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Sicherheitshinweise

Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen. Um sich mit der Bedienung des Rollators vertraut zu machen sollten Sie vor der ersten Benutzung mit dem Rollator auf ebenen, Ihnen bekannten Gelände üben. Dadurch vermeiden Sie riskante Situationen. Benutzen Sie den Rollator nur zu seinem Bestimmungsgemäßen Verwendungszweck! Benutzen Sie den Rollator nur im ausgeklappten Zustand bei verriegeltem Sicherungshebel! Die Maximale Belastbarkeit beträgt 120 kg! Der Rollator ist als Gehilfe für nur eine Person geeignet! Der Transport von Lasten und Personen ist nicht erlaubt! Nutzen Sie das Tablett nur für kleine und leichte Gegenstände. Es ist nicht geeignet für den Transport von spitzen, scharfen oder heißen Gegenständen! Hängen Sie keine Taschen oder ähnliches an die Handgriffe! Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass der Arthritisrollator unversehrt und funktionstauglich ist! Insbesondere ist auf die Funktionstauglichkeit Bremsen zu achten! Jede Bremse wirkt nur auf ein Laufrad! Belasten Sie den Rollator nur auf ebenem, horizontalem Untergrund! Beachten Sie, dass auf abschüssigem Gelände die Rollgeschwindigkeit höher werden kann als Ihre eigene Schrittgeschwindigkeit! Sturzgefahr! Das Kipprisiko vergrößert sich durch Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen, beim Sitzen oder schwerer Beladung! Betätigen Sie die Feststellbremsen, bevor Sie den Rollator als Sitz nutzen! Beim Zusammenklappen können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden! Verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel! Nehmen Sie ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen an der Konstruktion vor! Lassen Sie die Bremsen alle 6 Monate überprüfen!

Lieferumfang

Der Arthritisrollator wird vormontiert in einem Karton geliefert. Die Schieberöhre mit den Armauflagen und den Bremsen müssen noch befestigt und den Bedürfnissen des Benutzers angepasst werden. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Rahmengestell
- 2 Schieberöhre mit Armauflage
- 2 Handgriffe mit Bremse (bzw. optional Einhandbremse -> 1 Handgriff mit Bremse)
- Korb
- Tablett
- 4 Befestigungsschrauben
- Gebrauchsanweisung

Beschreibung des Rollators



Indikation

Die Verwendung des Arthritisrollator ist angezeigt bei Personen mit Gehbehinderung, Starkeingeschränkter Gehausdauer, geringen Restkräften, insbesondere Arthritis- oder Rheumapatienten, mangelnder Stützkraft in den Handgelenken, vermindelter Ellenbogenstreckung.

Kontraindikation


Die Verwendung des Arthritisrollators ist nicht angezeigt bei Wahrnehmungsstörungen, starken Gleichgewichtsstörungen, Sitzunfähigkeit.

Zweckbestimmung

Der Arthritisrollator ist eine vierrädrige Gehilfe, die für den Einsatz im Innen- und Außenbereich gedacht ist. Das Produkt dient der Verbesserung bzw. dem Ausgleich eingeschränkter Geheilung. Aufgrund seiner gepolsterten Armauflagen eignet sich dieser Rollator besonders für Arthritis- und Rheumapatienten.

Montage der Armpolster

Befestigen Sie die Schraube an der Klemme am Rahmengestell. Achten Sie darauf, dass sich die Markierung am Schraubenkopf in der Aussparung des Rahmens befindet. Stecken Sie das Schieberohr in die Rohrführung des Rahmengestells. Ziehen Sie die Befestigung fest an. Gehen Sie auf der anderen Seite genauso vor. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest angezogen sind und sich beide Schieberöhre sich auf gleicher Höhe befinden.

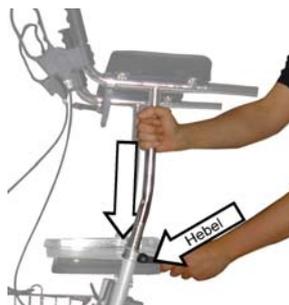

Montage Korb

Es kann ein Korb vorne am Rollator angebracht werden. Der Korb wird von oben auf die Haken gehängt, die sich am Rahmengestell unterhalb der Sitzfläche befinden. Für die Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor und heben den Korb von den Haken.



Tablett montieren

Das Tablett kann auf die Sitzfläche montiert werden. Legen Sie es dazu so auf die Sitzfläche, dass sich die 4 Kunststoffzapfen des Tablett in die Löcher der Sitzfläche einfügen. Das Tablett ist nun gegen Verrutschen gesichert. Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor und heben Sie das Tablett hoch.



Einstellen der Bremsen

Die Stärke der Bremsen kann individuell eingestellt werden. Drehen Sie dazu die sich am Bowdenzug befindlichen Rändelmuttern auseinander (Bremsen härter) oder hinein (Bremsen weicher). Die Bremsklötze dürfen ohne Betätigung nicht das Laufrad berühren.



Feststellbremsen

Um Ihren Arthritisrollator gegen ungewolltes Wegrollen zu sichern, betätigen Sie die Feststellbremse. Drücken Sie dazu den Griff der Bremse nach vorne. In dieser Position rastet der Griff hörbar ein. Um die Feststellbremse wieder zu lösen, ziehen Sie den Griff zu sich heran, wie auf der Abbildung dargestellt.



Betriebsbremse

Um die Geschwindigkeit während des Gehens zu verringern, betätigen Sie die Betriebsbremse. Ziehen Sie dazu den Griff zu sich heran, wie auf der Abbildung dargestellt. Durch Loslassen der Betriebsbremse wird die Bremsfunktion wieder aufgehoben.



Aufstellung

Betätigen Sie die Feststellbremse. Drücken Sie mit der flachen Hand von oben auf die Sitzfläche. Der Rollator beginnt nun sich zu entfalten. Ist der Rollator vollständig ausgeklappt, drehen Sie den Sicherungshebel gegen den Uhrzeigersinn. Vergewissern Sie sich, dass der Sicherungshebel die Endposition erreicht hat. Ihr Rollator ist wieder einsatzbereit, nachdem Sie die Feststellbremsen gelöst haben, wie in Abschnitt Fehler!



Zusammenfalten

Den Arthritisrollator kann zum platzsparenden Transport zusammengeklappt werden.

Betätigen Sie die Feststellbremse wie in Abschnitt Fehler! **Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** beschreiben. Drehen Sie den Sicherungshebel im Uhrzeigersinn nach oben.

Halten Sie den Hebel in dieser Position. Ziehen Sie die Querstrebe unterhalb der Sitzfläche mit leichtem Kraftaufwand zu sich heran.



Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. beschrieben.


Position der Handgriffe

Lösen Sie den Hebel unterhalb der Armauflage. Bringen Sie das Schieberohr mit der Bremse entlang der Rohrführung in die gewünschte Position. Ziehen Sie den Hebel abschließend fest an. Vergewissern Sie sich, dass sich beide Schieberohre in gleicher Position befinden.



Höheneinstellung der Armpolster

Lösen Sie den Hebel, der sich seitlich am Rahmengestell befindet. Bringen Sie nun das Rohr des Schieberohrs in die gewünschte Position. Ziehen Sie den Hebel abschließend wieder fest an. Vergewissern Sie sich, dass sich beide Schieberohre auf gleicher Höhe befinden.

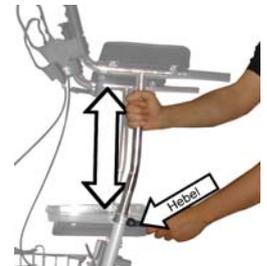

Technische Daten

Arthritisrollator

Bereifung	PU-Bereifung
Material	Stahlrahmen (lackiert) Sitzfläche PU Tablett PE
Sitzhöhe (cm)	59
Schiebegriffhöhe (cm)	99 – 119
Gesamtbreite (cm)	60
Gesamtlänge (cm)	70
Gewicht (kg)	13,5
Max- Belastbarkeit (kg)	120

Montage des Schieberohrs mit Feststellbremse

Montieren Sie zuerst die Armauflage. Stecken Sie nun das Schieberohr in die Führung des Rohres, wie in der Abbildung dargestellt. Befestigen Sie die Schraube an der Klemme im Rahmengestell. Achten Sie darauf, dass sich die Markierung am Schraubenkopf in der Aussparung des Rahmens befindet. Ziehen Sie nun die Befestigung mit dem Hebel fest an. Gehen Sie auf der anderen Seite genauso vor. Schieben Sie die Rohre nur so weit nach vorne, dass Sie am Ende gerade noch heraussehen.



Reinigung / Desinfektion

Sie sollten den Arthritisrollator in regelmäßigen Abständen reinigen. Benutzen Sie dazu bitte nur milde Reinigungsmittel. Die Räder können Sie mit einer Kunststoffbürste reinigen. Um den Rollator zu desinfizieren, können Sie handelsübliche Flächendesinfektionsmittel verwenden. Reinigen Sie den Rollator nie mit aggressiven Reinigungsmitteln und verwenden Sie keine Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger.

Wiedereinsatz

Der Arthritisrollator ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden. Der Arthritisrollator muss vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Wartung

Der Arthritisrollator ist wartungsfrei konzipiert. Eine Instandsetzung sollte nur von einem Fachhändler durchgeführt werden. Funktionseinschränkungen, wie Schwergängigkeit der Räder oder Nachlassen der Bremsen sollten unbedingt von einem Fachhändler untersuchen lassen. Auf Anfrage des Fachhändlers lassen wir Ihnen gerne weitere Unterlagen für Reparaturen und Instandsetzung zukommen.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Von der Garantie ausgenommen sind Verschleissteile wie Bereifung / Bodenzüge / Bremsklötze usw.

Trendmobil GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0

Telefax: +49 (0) 5254-9479-499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: