

Gebrauchsanweisungen bei Goll & Schracke Massing

Vielen Dank für Ihren Download der Gebrauchsanweisung von goll-schracke.de!

Sie haben eine Gebrauchsanweisung aus der Kategorie:

Sanitätshaus » Hilfsmittel » Dusch-und Toilettenstuhl

geladen. Sollten Sie im Anschluß der Nutzung der Gebrauchsanweisung Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Kontaktformular auf

goll-schracke.de/kontakt

oder über unsere Filialen

Sanitätshaus Remscheid

Hindenburgstr. 9
42853 Remscheid
Telefon 02191 499 110
Telefax 02191 499 1120

Sanitätshaus Wipperfürth

Untere Straße 8
51688 Wipperfürth
Telefon 02267 9252
Telefax 02267 2624

Reha-Center Remscheid

Jägerwald 16
42897 Remscheid
Telefon 02191 933 44 0
Telefax 02191 933 44 22

Reha Center

Burger Str.116
42859 Remscheid
Telefon 02191 933 44 0
Telefax 02191 933 44 32

Etwas vergessen?

Benötigen Sie eine andere oder weitere Gebrauchsanweisung? Dann klicken Sie in diese Box oder wählen Sie die Webseite an:

<https://goll-schracke.de/gebrauchsanweisungen>

Qualitätsfeedback

Wir würden uns freuen, ein Feedback von Ihnen, zu unserem Service zu erhalten!

Bitte klicken Sie hier in die Box oder wählen Sie:

<https://goll-schracke.de/qualitaetsmanagement>

Gebrauchsanleitung

Toilettenstuhl »Fahrbar« mit schwenkbaren Armlehnen und Fußrasten

Art.-Nr. 17502 100



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

⚠ Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob sich der Toilettenstuhl in einwandfreiem Zustand befindet und vergewissern Sie sich über den festen Sitz aller Verbindungen!
- Bei Unsicherheiten oder offenen Fragen zur Montage oder Pflege fragen Sie bitte Ihren Fachhändler!
- Das angegebene Höchstgewicht von 120 kg für Benutzer darf nicht überschritten werden!
- Achten Sie bitte darauf, dass der Toilettenstuhl Ihren Bedürfnissen entspricht. Fragen Sie im Zweifel Ihren Arzt oder Fachhändler!
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch den Fachhändler ersetzt werden!
- Der Toilettenstuhl darf nicht im Freien verwendet, abgestellt oder aufbewahrt werden!
- Verwenden Sie den Toilettenstuhl nur auf horizontalem, ebenem und festem Untergrund!
- Vermeiden Sie weites Hinauslehnen und starke ruckartige Bewegungen!
- Bei Verwendung in Verbindung mit einem Toilettenbecken sind die Bremsen festzustellen!
- Das Setzen auf die Armlehnen ist strengstens untersagt!
- Steigen Sie niemals beim Ein- oder Aussteigen auf die Fußrasten!

Der Toilettenstuhl erhöht die Selbstständigkeit bei der Toilettenbenutzung und verbessert die damit verbundenen körperhygienischen Maßnahmen, insbesondere indem er beeinträchtigte oder fehlende Funktionen des Bewegungs- oder Halteapparates kompensiert. Er ist geeignet für Patienten mit einem Körpergewicht von max. 120 kg.

Indikation

Die Verwendung des Toilettenstuhls ist angezeigt bei Patienten mit fehlender Rumpfkontrolle, Gleichgewichtsstörungen, erheblichen Funktionsausfällen an den unteren Extremitäten, für Hüft- und Wirbelsäulenversteifte bzw. für Ohnhänder, Tetraplegiker oder Armgeschädigte mit erheblicher Störung der Greiffunktion.

Lieferumfang

Der Toilettenstuhl wird teilweise vormontiert im Karton verpackt geliefert. Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit:

- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Fahrgestell mit 2 Rollen, 2 Bremsrollen und 2 Sternschrauben
- 1 Rückenlehne mit 2 gepolsterten Armlehnen und 2 Zugschnappern
- 2 Fußrasten
- 1 ABS-Toilettensitz
- 1 Toiletteneimer mit Deckel und Bügel
- 1 Sitzpolster
- 1 Wadenband mit Klettverschluss




Montage

Um den Toilettenstuhl vollständig zu montieren, stellen Sie das Fahrgestell vor sich auf und stellen die Bremsrollen fest, damit der Toilettenstuhl beim Zusammenbau nicht wegrollen kann.

Rücken- und Armlehnen montieren

- ① Nehmen Sie die Rückenlehne aus dem Karton. Stecken Sie die Rohrenden der Rückenlehne in die Rohrenden des Fahrgestells bis zum Anschlag ein. Achten Sie darauf, dass die Innenseite der Rückenlehne zur Stuhlmitte zeigt.
- ② Drehen Sie die beiden Sternschrauben auf der Stuhl-Rückseite im Uhrzeigersinn fest an.
- ③ Die Armlehnen rasten selbsttätig ein, wenn Sie sie mit einem kleinen Ruck von unten nach oben schwenken.

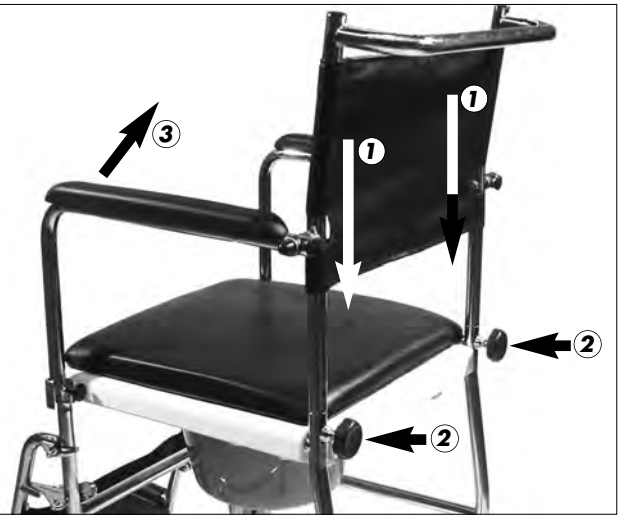


Fußrasten montieren

Stecken Sie das Fußrasten-Rohrgestänge in die dafür vorgesehenen Halterungsstifte am Haupttrahmen. Schwenken Sie das Fußrasten-Rohrgestänge zur Mitte. Die Verschlussmechanik schnappt automatisch ein. Nun können Sie die Fußplatten herunterklappen. Abschließend hängen Sie das Wadenband in seine Halterung am Fußrastengestänge.

Fußrastenhöhe einstellen

Dazu benötigen Sie einen Maul-/ oder Ringschlüssel SW10. Stellen Sie die Fußrasten in der Höhe so ein, dass Ihr Oberschenkel waagrecht ist, wenn Sie im Sitzen die Füße auf den Fußrasten haben.


- ① Lösen Sie die Klemmschraube am Fußrastenrohr.
- ② Schieben Sie die Fußraste in die erforderliche Höhe. Das Rohr darf maximal bis zur Rohrmarkierung herausgezogen werden! Ziehen Sie die Klemmschraube wieder fest an.

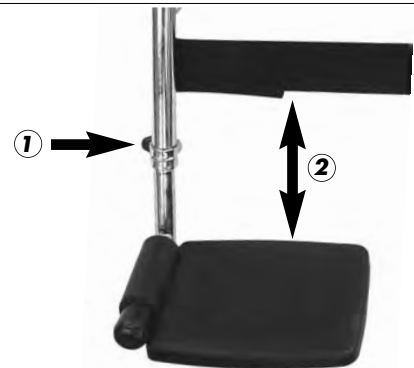

Sitz und Toiletteneimer montieren

- ① Nehmen Sie den weißen Sitz und setzen Sie ihn von oben auf den Haupttrahmen. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Sitzplatte: Die geschlossene, runde Kante des Sitzes zeigt nach vorn, die Toiletteneimer-Führung auf der Sitzunterseite zeigt nach hinten.
- ② Den Toiletteneimer können Sie mit oder ohne Deckel von hinten unter der Sitzfläche in die Führung schieben.

Abschließend können Sie die gepolsterte Sitzabdeckung auf den Toilettensitz legen, um den Komfort beim normalen Sitzen zu erhöhen.

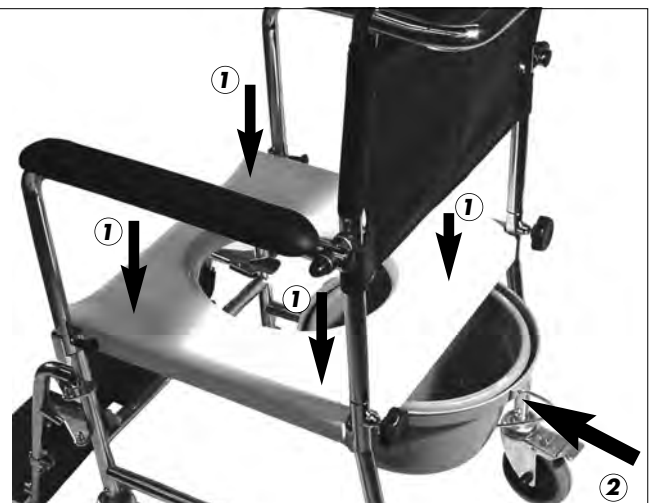

Anwendung

Ein- und Aussteigen

Achtung! Während des Ein- und Aussteigens niemals auf die Fußrasten steigen!

- Bringen Sie den Toilettenstuhl und die Sitzfläche, auf der Sie sitzen oder auf die Sie wechseln möchten, möglichst dicht seitlich aneinander heran.
- Sichern Sie beide Sitzhilfen durch Feststellen der Bremsen.
- Schwenken Sie Seitenteile und Beinstützen weg.
- Rutschen Sie nun seitlich auf die Sitzfläche. Achten Sie bitte darauf, dass Sie so weit wie möglich hinten im Sitz sitzen.
- Schwenken Sie Arm- und Beinstützen wieder in Ihre Ausgangsposition.

Bremsen

Wenn der Toilettenstuhl nicht bewegt werden soll, stellen Sie die Bremsen an den beiden Bremsrollen fest.

- ① Die Bremsrollen stellen Sie durch einfache Fußbetätigung des Bremshebels nach unten fest.
- ② Zum Lösen der Bremsen drücken Sie mit dem Fuß den hinteren Teil des Bremshebels zurück in seine Ausgangsposition.



ungebremste Rolle feststellen

gebremste Rolle lösen

Toilettenstuhl-Eimer

Vor der Verwendung des Toilettenstuhl-Eimers entfernen Sie den Deckel des Eimers.

Schieben Sie den Toilettenstuhl-Eimer anschließend von hinten unter den Sitz in seine Führungsschienen. Schieben Sie den Eimer ganz durch bis er merklich einrastet und somit gegen versehentliches Herausfallen gesichert ist.

Praxis-Tipp: Vor Gebrauch bedecken Sie den Toilettenstuhl-Eimer mit etwas Toilettenpapier oder füllen etwas Wasser hinein. Dies erleichtert die spätere Reinigung.




Armlehnen

Die Armlehnen können Sie nach unten wegschwenken, um das Umsteigen zu vereinfachen.

- ① Ziehen Sie am Zugschnäpper an der Armlehne
- ② und schwenken Sie die Armlehne nach unten weg.

Wenn Sie die Armlehne hochziehen rastet der Zugschnäpper wieder automatisch ein und die Armlehne ist gesichert.

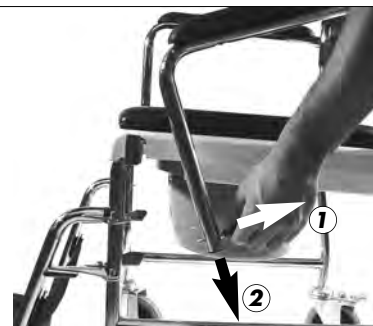

Fußrasten

Die Fußrasten sind hochklappbar und zur Seite schwenkbar.

Zum Schwenken ziehen Sie den Hebel nach innen und die Fußraste ist verstellbar.



Reinigung

Reinigen Sie den Toilettenstuhl mit einem milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keinen ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Zur Oberflächen-Wischdesinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel mit einem Alkoholgehalt von max. 75%. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.

Patientenwechsel

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Es ist entsprechend den Anweisungen zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist es durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für einen Wiedereinsatz freizugeben.

Wartung

Der Toilettenstuhl ist wartungsfrei. Überprüfen Sie lediglich regelmäßig die Unversehrtheit des gesamten Toilettenstuhls, seiner Komponenten und Verbindungen gemäß des Wartungs- und Reinigungsplans.

Entsorgung

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

Technische Daten

Maße:	87 x 57 x 93 cm (L x B x H)
Leergewicht:	13,3 kg
Sitzmaße ohne Sitzpolster:	49 x 45 x 45 cm (H x B x T)
Armlehne:	22 x 5 x 44 cm (H x B x L)
Rückenlehnenhöhe:	41 cm
Rückenlehnen-Winkel nach hinten:	7°
Max. Belastbarkeit:	120 kg
Rollenmaße:	13 x 3 cm (Ø x B)

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung (24 Monate ab Kaufdatum). Diese Gewährleistung gilt nicht, soweit der Defekt des Produktes auf unsachgemäße Behandlung und/oder Missachtung der Zweckbestimmung und den in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Verhaltensregeln zurückzuführen ist. Aus der Gewährleistung ausgeschlossen sind Verschleißteile. Es sind nur Originalersatzteile zu verwenden.

