

Gebrauchsanweisungen bei Goll & Schracke Massing

Vielen Dank für Ihren Download der Gebrauchsanweisung von goll-schracke.de!

Sie haben eine Gebrauchsanweisung aus der Kategorie:

Sanitätshaus » Hilfsmittel » Dusch-und Toilettenstuhl

geladen. Sollten Sie im Anschluß der Nutzung der Gebrauchsanweisung Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Kontaktformular auf

goll-schracke.de/kontakt

oder über unsere Filialen

Sanitätshaus Remscheid

Hindenburgstr. 9
42853 Remscheid
Telefon 02191 499 110
Telefax 02191 499 1120

Sanitätshaus Wipperfürth

Untere Straße 8
51688 Wipperfürth
Telefon 02267 9252
Telefax 02267 2624

Reha-Center Remscheid

Jägerwald 16
42897 Remscheid
Telefon 02191 933 44 0
Telefax 02191 933 44 22

Reha Center

Burger Str.116
42859 Remscheid
Telefon 02191 933 44 0
Telefax 02191 933 44 32

Etwas vergessen?

Benötigen Sie eine andere oder weitere Gebrauchsanweisung? Dann klicken Sie in diese Box oder wählen Sie die Webseite an:

<https://goll-schracke.de/gebrauchsanweisungen>

Qualitätsfeedback

Wir würden uns freuen, ein Feedback von Ihnen, zu unserem Service zu erhalten!

Bitte klicken Sie hier in die Box oder wählen Sie:

<https://goll-schracke.de/qualitaetsmanagement>

Gebrauchsanweisung Dusch-Toiletten-Rollstuhl „DTR 24“ und „DTR 5“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Der Dusch-Toiletten-Rollstuhl mit 5 Zoll Rädern ist stets in Anwesenheit einer Hilfsperson zu benutzen. Das Modell DTR 24 ist mit 24-Zoll Antriebsrädern ausgestattet und kann somit vom Benutzer selbstständig bedient werden
Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Dusch Toiletten-Rollstuhles. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.



Lieferumfang

Der Dusch-Toiletten-Rollstuhl wird ihm Karton verpackt geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient.

Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

- 1 Verpackungs- und Transportkarton
- 1 Gestell mit montierter Bereifung und Fußplatte
- 1 Rückenlehne mit Armlehnen
- 1 Sitzpolster mit Hygieneausschnitt und Abdeckplatte
- 1 Rückenlehne
- 1 Eimer
- 1 Gebrauchsanweisung

Beschreibung des DTR 24



Beschreibung des DTR 5



Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrem Dusch-Toiletten-Rollstuhl auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben um riskante Situationen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr DTR unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind und die Bremsen funktionstüchtig sind.
- Achten Sie darauf, dass der Dusch-Toiletten-Rollstuhl stets vor dem Wegrollen durch Betätigung der Feststellbremse gesichert ist.
- Der Dusch-Toiletten-Rollstuhl ist nur für den Transport einer Person geeignet. Der Transport von Lasten oder mehreren Personen wird als Zweckentfremdung betrachtet.
- Die Benutzung darf ausschließlich im Innenraum und auf festem Untergrund erfolgen.
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen oder Beladung vergrößert werden.
- Zur Überwindung von Hindernissen verwenden Sie bitte unbedingt Auffahrampen.
- Stellen Sie sich nie beim Ein- und Aussteigen auf die Fußplatten
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Indikation

Der Dusch-Toiletten-Rollstuhl ist dann erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist. Die Versorgung ist außerdem angezeigt, wenn der Benutzer die vorhandene Badewanne und/oder Dusche nicht nutzen kann, die Dusche allerdings so gestaltet ist, das ihr Befahren mit einem Duschrollstuhl möglich ist. Der DTR kann zusätzlich als Sitzgelegenheit und Zimmerrollstuhl genutzt werden

Kontraindikation

Die Verwendung des Dusch-Toiletten-Rollstuhls ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Sitzfläche montieren (Modell DTR 5)

Betätigen zuerst die Feststellbremsen
Schieben Sie die Sitzfläche mit der Aussparung in die hintere Quertraverse des Rahmens
Drücken Sie nun die Sitzfläche mit einem Ruck auf den Rahmen



Rückenlehne montieren (Modell DTR 5)

Drehen Sie zuerst beide Feststellschrauben am Rahmen heraus
Schieben Sie die Rohre der Rückenlehne in den Rahmen
Ziehen Sie die Feststellschrauben wieder fest an
Klappen Sie die Armlehnen in die waagerechte Position




Höhenverstellung der Fußstützen (Modell DTR 5)

Lösen Sie die Mutter und entfernen Sie die Schraube
Bringen Sie die Fußstützen in die gewünschte Position
Stecken Sie nun die Schraube wieder in die nächstgelegene Bohrung
Ziehen Sie abschließend die Sechskantschrauben wieder fest an
Achten Sie darauf, dass sich beide Fußstützen auf gleicher Höhe befinden



Feststellbremse (Modell DTR 24)

Die Bremse muss verdrehsicher befestigt sein, und darf nicht lose sein. Der Abstand zwischen Bremsbolzen und Reifendecke muss bei max. geöffnetem Bremsmechanismus an der engsten Stelle 17 mm betragen! Zum Einstellen/Korrigieren des Abstandes lösen Sie die Verschraubung (1). Schieben Sie die Bremsen in die korrekte Position, so dass der Abstand Bremsbolzen-Reifendecke = 17 mm beträgt (2). Ziehen Sie anschließend die Verschraubung wieder fest und prüfen die Funktion. Der Dusch-Toiletten-Rollstuhl sollte bei angezogener Bremse nicht verschiebbar sein.

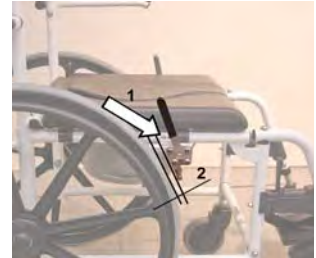

Abnehmen der Antriebsräder (Modell DTR 24)

Um den DTR Platz sparend zu transportieren, können Sie die Antriebsräder einfach abmontieren. Drücken Sie dazu den Schnellspannknopf bis zum Anschlag hinein
Nehmen Sie nun das Rad von der Achse. Um das Rad wieder zu montieren, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor
Vergewissern Sie sich, dass das Rad auf der Achse wieder eingerastet ist



Feststellbremsen (Modell DTR 5)

Der DTR 5 ist mit vier 5-Zoll Schwenkrollen ausgestattet. Die beiden hinteren sind als Totalfeststeller ausgeführt. D.h. nach Betätigung sind die Rollen gebremst und gegen verdrehen gesperrt.
Betätigen Sie die Bremse durch einen Tritt auf die Feststellwippe
Zum Lösen der Bremse treten Sie auf den kleinen Wiphebel



Kniehebelbremsen (Modell DTR 24)

Der Modelltyp DTR 24 ist mit Kniehebelbremsen ausgestattet, die durch den Insassen bedienbar sind. Diese ist nur zum Parken zu verwenden. Zum Abbremsen der Fahrt ist diese nicht geeignet! Hierzu dienen die Greifreifen, auf die mit den Handflächen leichter Druck ausgeübt wird. betätigen Sie beide Reifenbremsen durch nach-vorn-drücken des Bremshebels der DTR 24 steht nun sicher gebremst



Wegschwenken der Fußstützen (Modell DTR 5)

Um das Einsteigen zu erleichtern, können die Fußstützen nach außen geschwenkt werden
Betätigen Sie dazu zuerst die Feststellbremsen
Drücken Sie nun den Hebel wie in der Abbildung dargestellt
Nun kann die Fußstütze um 90° nach außen gedreht werden
Um Sie wieder in die Ausgangsposition zu bringen, einfach um 90° zur Mitte drehen



Abnehmen der Fußstützen (Modell DTR 5)

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
Gehen Sie so vor, wie in Abschnitt **Fehler!**
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. beschrieben
In der Außenposition kann die Fußstütze nach oben aus der Führung herausgezogen werden
Um diese wieder zu montieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor



Ein- und Aussteigen von der Seite (Modell DTR 5)

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
Die Armlehnen können zum leichteren Ein- und Aussteigen einfach nach oben geschwenkt werden



Ein- und Aussteigen von vorne (Modell DTR 5)

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
Die Beinstütze kann zum leichteren Ein- und Aussteigen einfach nach hinten geschwenkt werden (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Wegschwenken der Fußstützen)
Sobald Sie sicher Platz genommen haben bringen Sie die Fußstützen in die normale Position



Benutzung als Toilettenstuhl (Modell DTR 5)

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
Zur Benutzung als Toilettenstuhl schieben Sie den Eimer ohne Deckel von hinten entlang der Führung unter den Sitz
Entfernen Sie die Hygieneabdeckung
Entfernen Sie den Eimer nach der Benutzung und verschließen Sie ihn mit dem Deckel



Nach der Benutzung als Toilettenstuhl

- Entfernen Sie den Toiletteneimer erst nachdem die Person nicht mehr auf dem Toilettenstuhl sitzt, sonst besteht Klemmgefahr.
- Legen Sie den Deckel auf
- Reinigen Sie anschließend das Produkt mit allen erforderlichen Maßnahmen

Benutzung als Duschstuhl

- Betätigen Sie zuerst die Feststellbremse
- Entfernen Sie den Toiletteneimer
- Ziehen Sie dazu den Eimer nach hinten heraus
- Zur Erleichterten Körperreinigung und -pflege entfernen Sie die Hygieneabdeckung.

Reinigung

Der Dusch-Toiletten-Rollstuhl sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden. Die Desinfektion sollte nach jedem Toilettengang erfolgen.

- Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden)
- Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Wartung

Der Dusch-Toiletten-Rollstuhl ist weitestgehend wartungsfrei konzipiert. Falls eine Instandsetzung erforderlich sein sollte, lassen Sie diese nur von Ihrem Fachhändler durchführen.

Maßnahme	täglich	monatlich	jährlich	Bemerkungen
Radlager ölen			X	Durch Fachhandel
Bremsen kontrollieren	X	X	X	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Polsterung		X	X	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Rahmenteile		X	X	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Verbindungen		X	X	Durch Benutzer und Fachhandel

Auf Anfrage des Fachhandels, lassen wir Ihnen gerne weitere Unterlagen für Reparaturen und Instandsetzung zu kommen.

Technische Daten

Duschoilettenstuhl	DTR 5	DTR 24
Bereifung	4 x Räder 5"	2 x Räder 5", 2 x Räder 24"
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	Weiss	Weiss
Sitzbreite (cm)	44	44
Sitztiefe (cm)	42	42
Sitzhöhe (cm)	54	55
Armlehnenhöhe (cm)	22	23
Gesamtbreite (cm)	57	64
Gesamttiefe (cm)	90	110
Gesamthöhe (cm)	99	102
Überfahrhöhe-WC (cm)	47	47
Max- Belastbarkeit (kg)	120	120
Gewicht (kg)	14	18,8

Trendmobil GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0

Telefax: +49 (0) 5254-9479-499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Ihr Fachhändler: