

## Gebrauchsanweisungen bei Goll & Schracke Massing

Vielen Dank für Ihren Download der Gebrauchsanweisung von [goll-schracke.de](http://goll-schracke.de)!

Sie haben eine Gebrauchsanweisung aus der Kategorie:

### **Orthopädie » Hilfsmittel » Orthesen**

geladen. Sollten Sie im Anschluß der Nutzung der Gebrauchsanweisung Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Kontaktformular auf

[goll-schracke.de/kontakt](http://goll-schracke.de/kontakt)

oder über unsere Filialen

#### **Sanitätshaus Remscheid**

Hindenburgstr. 9  
42853 Remscheid  
Telefon 02191 499 110  
Telefax 02191 499 1120

#### **Sanitätshaus Wipperfürth**

Untere Straße 8  
51688 Wipperfürth  
Telefon 02267 9252  
Telefax 02267 2624

#### **Reha-Center Remscheid**

Jägerwald 16  
42897 Remscheid  
Telefon 02191 933 44 0  
Telefax 02191 933 44 22

#### **Reha Center**

Burger Str.116  
42859 Remscheid  
Telefon 02191 933 44 0  
Telefax 02191 933 44 32

### **Etwas vergessen?**

Benötigen Sie eine andere oder weitere Gebrauchsanweisung? Dann klicken Sie in diese Box oder wählen Sie die Webseite an:

<https://goll-schracke.de/gebrauchsanweisungen>

### **Qualitätsfeedback**

Wir würden uns freuen, ein Feedback von Ihnen, zu unserem Service zu erhalten!

Bitte klicken Sie hier in die Box oder wählen Sie:

<https://goll-schracke.de/qualitaetsmanagement>

## Fußlagerungsschiene mit Schnallen

### Orthese zur Ruhigstellung des Fußes in plantigrader Stellung

#### Material:

Jeans, Polyester-Frottée („Coolquick“), Velcrobänder, Schaumstoff aus Polyurethan, Stabilisator aus Polyäthylen mit Aluminium-Verbindungselementen, Kunststoffschnallen.



Materialien mit Hautkontakt entsprechen Öko Tex 100 Standard

#### Indikation:

- ⤴ Posttraumatische und postoperative Zustände nach Frakturen und Bandläsionen im Bereich des OSG u. USG, der Fußwurzel und des Mittelfußes
- ⤴ Ruhigstellung nach Ruptur der Achillessehne
- ⤴ Schmerzhaftes Schwellungen bei entzündlichen Weichteilveränderungen (Tendovaginitis, Weichteilrheumatismus)
- ⤴ Wundheilungsstörungen

#### Kontraindikation:

- ⤴ Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

#### Applikation:

- ⤴ Velcrobänder lösen und Fuß in die Schiene legen. Dabei darauf achten, dass die Ferse in die entsprechende Aussparung und der Fuß in plantigrade Position (Rechtwinkelstellung zum Unterschenkel) zu liegen kommt. Dies kann durch Beugung im Kniegelenk mit entspannter Wadenmuskulatur erleichtert werden. Velcrobänder durch die Schnallen führen und in Gegenrichtung mit Haken auf Flausch fixieren.

#### Vorsichtsmaßnahmen:

- ⤴ Das Produkt ist zur Lagerung des Fußes vorgesehen („Nachtlagerungsschiene“). Die Stabilität ist begrenzt. Der Fuß soll deshalb nicht belastet werden. Wegen des die Sohle bedeckenden textilen Teiles aus Jeans besteht zu dem Rutschgefahr.
- ⤴ Bei Druckbeschwerden sollte überprüft werden, ob die richtige Größe gewählt wurde. Ferner ist die Spannung der Velcrobänder zu überprüfen.

Die Garantie und die Gewährleistung liegen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen.

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

Trocken lagern.



#### Größen :

	Schuhgröße
Links:	
Art. No.: 88156 Small	< 39
88157 Medium	39 - 43
88158 Large	44-48
88159 X-Large	> 48



Zur chemothermischen Wäschedesinfektion gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz sollte ein handelsübliches Desinfektionswaschmittel z.B. SuperSan forte nach Herstelleranweisung verwendet werden.

**Vertrieb D:**  
TRIAMED GmbH & Co. KG  
D-59348 Lüdinghausen

**Hersteller + Vertrieb CH:**  
smedico, CH-9016 St. Gallen  
www.smedico.ch